

ProSense

Art nr 60006


Liggyta

100%
Polyester

Lakansskydd "JENS"

Lakansskyddet är av högabsorberande material med ett spärrskikt som "andas" kroppsvärmen, men är ändå helt vätsketätt. Skyddet är laminerat vilket gör det starkt och resulterar även i en slät bäddyta, vilket minskar risk för t.ex. trycksår. Lakansskyddet är färgkodat för att brukare/personal lätt ska kunna avgöra vilken sida som ska vara upp respektive ner i sängen (anvisning finns på tvättablapp). Lakansskyddet har bäddflikar som bäddas under madrassen och gör att skyddet ligger på plats i sängen.



Benämning:	ProSense Lakansskydd "JENS"- med bäddflikar
Varumärke:	ProSense
Art. nr:	60006
Liggyta: Längd (cm) x Bredd (cm)	85 x 90
Totalyta: (cm)	85 x 190
Bäddflikar:	Ja
Material liggyta:	100% Polyester (vit ovansida)
Material undersida:	100% Polyester (blå undersida)
Material bäddflikar:	50% Bomull, 50% Polyester
Spärrskikt:	Polyuretan
Absorbitionsskikt:	65% Polyester, 35% Rayon
Abs kapacitet SS8760033:2015: (ml)	1710
Antal / frp:	3 st
Vikt: (g)	Ca. 440
Produktinformation:	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning, förvaras i rumstemperatur. Produkten innehåller ingen PVC eller Latex.
Tvättråd:	Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet omgående sköljas i kallt vatten. 
Antal tvättar (hushållstvätt)	Ca 450 st
Användning och bruksanvisning:	Lakansskyddet är avsett för personer med urinläckage. Lakansskyddet går även att använda vid hyperhidros. Tvätta lakansskyddet innan användning för att aktivera materialet. Bädda ALLTID in bäddflikarna OBS! Lakansskyddet är ej anpassat att lyfta personer eller att förflytta personer med. Kan krympa cirka 3%.



Se till att sömmar och material är hela och felfria. Vid tecken på slitage och fel ska produkten kasseras. Placera ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål som avger hög värme. Vid allvarliga fel kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Tjugohundra 18 AB
Tenorvägen 35,
302 93 Halmstad



STANDARD 100



SHHO 094484
TE STE X

www.oeko-tex.com



ProSense

Tjugohundra 18 AB
Tenorvägen 35, 302 93 Halmstad

Email : info@prosense.nu


www.prosense.nu

MD

EUDAMED



SE-MF-000003776

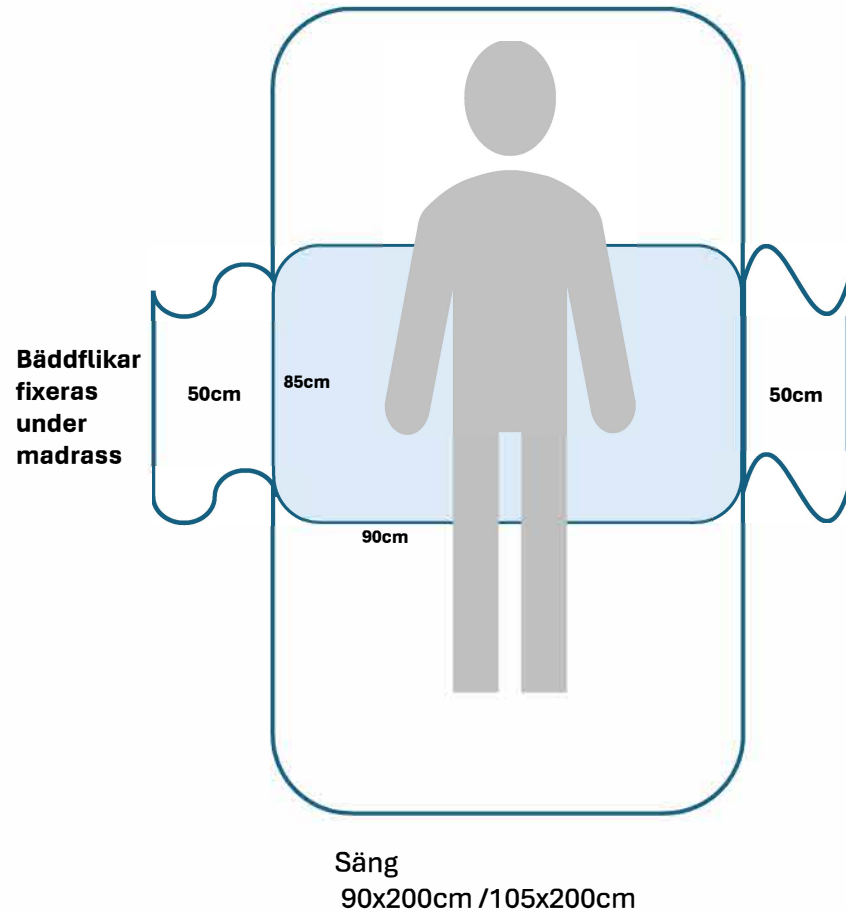

Tvåtråd:

Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet omgående sköljas i kallt vatten.



Lakansskyddet är avsett för personer med urinläckage. Lakansskyddet går även att använda vid hyperhidros. Tvätta lakansskyddet innan användning för att aktivera materialet. Bädda ALLTID in bäddflikarna OBS! Lakansskyddet är ej anpassat att lyfta personer eller att förflytta personer med. Kan krympa cirka 3%

Bruksanvisning – Så bäddar du lakansskydd

1. Lägg lakansskyddet på sängen

Placera skyddet ovanpå lakanet med den vattentäta (blå) sidan nedåt och den mjuka textilsidan uppåt.

2. Centrera skyddet

Se till att skyddet ligger rakt och centrerat i sängens bredd. Skyddet ska täcka området där överkropp och höfter ligger.

3. Justera längden

Skyddet ska ligga så att **höfter är på skyddet**, medan **fötterna kan vara utanför**. Detta ger både skydd och god komfort.

4. Fixera under madrassen

Vik ner bäddflikarna runt madrassens kanter så att skyddet hålls på plats och inte glider.