





Lakansskydd "JOAKIM"

ProSense tvättbara underlägg kan användas separat eller som komplement till annan inkontinensprodukt. Produkten är tillverkad av högabsorberande material som säkerställer snabb absorption av urin och andra kroppsvätskor och bibehåller en torr liggyta. Spärrskiktet ger ett fullständigt vätskeskydd samtidigt som det är andningsbart, vilket bidrar till en behaglig kroppstemperatur.

Skyddet är laminerat över hela liggytan, vilket gör att det absorberande materialet fördelas jämnt och hålls samman så att både funktion och form bibehålls under användning. Den laminerade liggytan är slät och mjuk, vilket minskar risken för sidoläckage och trycksår.

Lakansskyddet är färgkodat för att brukare och personal enkelt ska kunna avgöra vilken sida som ska ligga upp respektive ned i sängen (anvisning finns på tvättlappen). Det är även försett med bäddflikar som viks in under madrassen och håller skyddet på plats.

Benämning:	ProSense Lakansskydd "JOAKIM" - med bäddflikar
Varumärke:	ProSense
Art. nr:	60008
Liggyta:Längd(cm) x Bredd(cm)	85x90
Totalyta:(cm) (med bäddflikar)	85x190
Bäddflikar:	Ja
Material liggyta:	100% Polyester (Vit)
Material undersida:	100% Polyester (Blå)
Material bäddflikar:	100% Polyester
Spärrskikt:	Polyuretan
Absorbitionsskikt:	95% Polyester, 5% Rayon
Abs kapacitet SS8760033:2015:(ml)	Ca.1745
Antal / frp	3 st
Vikt: (g)	Ca. 403
Produktinformation:	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning, förvaras i rumstemperatur. Produkten innehåller ingen PVC eller Latex.
Tvättråd:	Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet omgående sköljas i kallt vatten. 
Antal tvättar (hushållstvätt):	Ca. 450 st
Användning och bruksanvisning:	ProSense tvättbara underlägg kan användas separat eller som komplement till andra inkontinensprodukter. Underläggen är avsedda för bruk i både säng och stol vid inkontinens. Tvätta lakansskyddet före första användning för att aktivera materialet. Bädda alltid in bäddflikarna. Observera: Lakansskyddet är inte avsett för att lyfta eller förflytta personer. Produkten kan krympa med cirka 3 %.
	Se till att sömmar och material är hela och felfria. Vid tecken på slitage och fel ska produkten kasseras. Placera ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål som avger hög värme. Vid allvarliga fel kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Tjugohundra18 AB
Tenorvägen 35, 302 93
Halmstad



STANDARD 100



SHHO 094484
TE STE X

www.oeko-tex.com

MD


 ProSense

Tjugohundra 18 AB

Tenorvägen 35, 302 93 Halmstad

Email : info@prosense.nu

www.prosense.nu

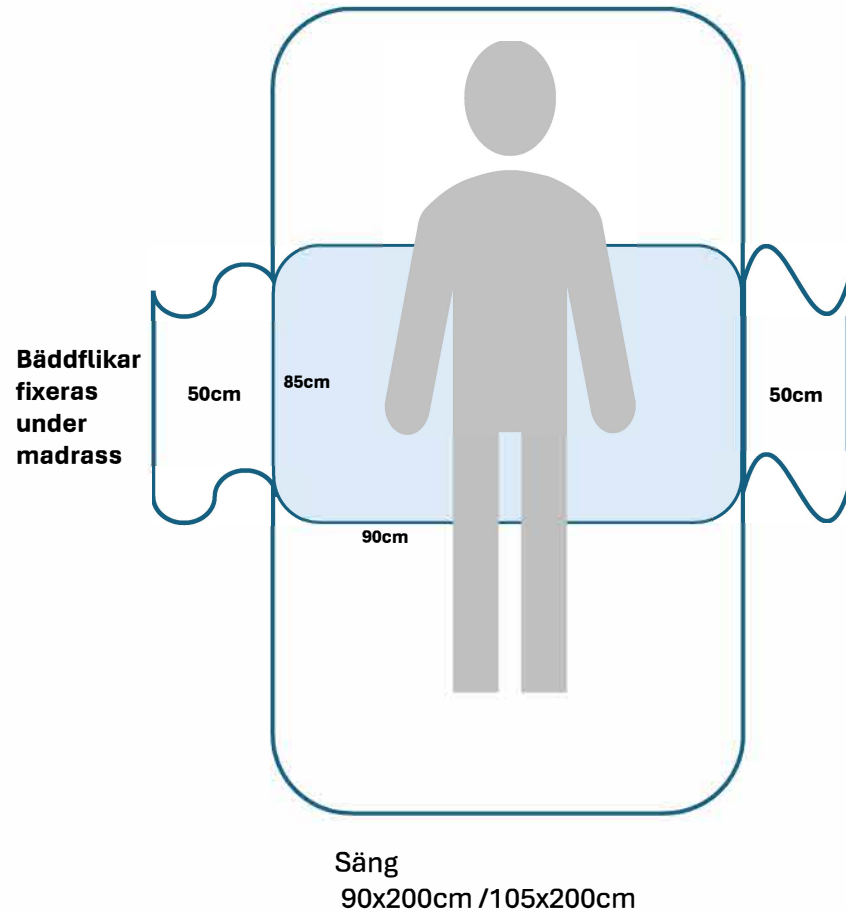

Tvåtråd:

Vid avförings- eller blodfläckar bör lakanskyddet omgående sköljas i kallt vatten.



Lakansskyddet är avsett för personer med urinläckage. Lakansskyddet går även att använda vid hyperhidros. Tvätta lakansskyddet innan användning för att aktivera materialet. Bädda ALLTID in bäddflikarna OBS! Lakansskyddet är ej anpassat att lyfta personer eller att förflytta personer med. Kan krympa cirka 3%

Bruksanvisning – Så bäddar du lakansskydd

1. Lägg lakansskyddet på sängen

Placera skyddet ovanpå lakanet med den vattentäta (blå) sidan nedåt och den mjuka textilsidan uppåt.

2. Centrera skyddet

Se till att skyddet ligger rakt och centrerat i sängens bredd. Skyddet ska täcka området där överkropp och höfter ligger.

3. Justera längden

Skyddet ska ligga så att **höfter är på skyddet**, medan **fötterna kan vara utanför**. Detta ger både skydd och god komfort.

4. Fixera under madrassen

Vik ner bäddflikarna runt madrassens kanter så att skyddet hålls på plats och inte glider.